

Elektrischer Nasensauger – Gebrauchsanweisung

NH-9

Anwendung:

1. Vor der Anwendung den Saugerkopf für 10 Minuten in warmes Salzwasser einlegen, um ihn zu desinfizieren. Anschließend den Nasensauger gemäß der Anleitung zusammensetzen, das Gerät einschalten und mit der Entfernung des Nasensekrets von den Nasenwänden beginnen.
2. Was tun, wenn das Sekret eingedickt oder angetrocknet ist? Verwenden Sie zunächst Kochsalzlösung oder Nasenspray. Sprühen Sie es in die Nasenhöhle und warten Sie 4–5 Minuten, bis das Sekret aufgeweicht ist.

Anwendungsschritte:

1. Der Saugerkopf darf die Innenseite der Nase nicht direkt berühren – das Sekret wird nach dem Vakuumprinzip abgesaugt.
2. Setzen Sie das Baby in eine halb sitzende oder halb liegende Position, der Kopf sollte leicht nach hinten geneigt sein (falls die Nase trocken ist, zuvor mit Kochsalzlösung oder Nasenspray anfeuchten).
3. Schalten Sie das Gerät ein (zwei Stufen wählbar). Halten Sie den Saugerkopf in einem Winkel von ca. 45° an das Nasenloch, verschließen Sie die Öffnung, um einen geschlossenen Raum zu bilden (bei korrektem Verschluss wird das Geräusch des Gerätes stärker).
4. Verschließen Sie dabei das andere Nasenloch vorsichtig mit dem Finger für 1–2 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Sekret vollständig entfernt ist.

Weitere Methoden zur Sekretauflockerung:

- **Methode 1:** 1–2 Tropfen Sesamöl in die Nase träufeln. Innerhalb von 10–15 Minuten wird das Sekret aufgeweicht und kann leichter abgesaugt werden. (Traditionelle Methode, ohne Nebenwirkungen, auch von Ärzten empfohlen.)
- **Methode 2:** Mit in warmes Wasser getränkter Gaze oder Wattestäbchen den Nasenbereich sanft 3–5 Mal erwärmen, anschließend den Nasensauger verwenden.
- **Methode 3:** Einige Tropfen Lebertran in die Nase geben, 10–15 Minuten warten und dann das Sekret absaugen.

⚠ **Wichtig:** Wenden Sie niemals gewaltsame oder grobe Methoden zur Reinigung der Babynase an!
Basierend auf Kundenrückmeldungen ist Methode 1 die effektivste und sicherste.

Was tun, wenn das Sekret nicht sichtbar ist, aber Sie hören, dass die Nase pfeift oder verschleimt klingt?

- **Tipp 1:** Tauchen Sie ein Wattestäbchen für Babys in Sesamöl und reinigen Sie vorsichtig nach und nach die Nase. Falls dies nicht gelingt, warten Sie einige Tage, bis das Sekret von selbst herauskommt.
 - **Tipp 2:** Bei leichter Verstopfung ein warmes Handtuch auf den Nasenrücken legen. Bei stärkerer Verstopfung etwas geriebenen Ingwer anrösten, in Gaze wickeln und an die Fußsohlen des Babys binden.
 - **Tipp 3:** Ein Handtuch mit Zwiebelsud anfeuchten, auswringen (nicht zu trocken) und für einige Minuten auf die Nase des Babys legen.
 - **Tipp 4:** Mit in heißes Wasser getränkter und ausgedrückter Gaze oder Wattestäbchen den Nasenrücken erwärmen – das Sekret löst sich und tritt schnell aus.
-

Hersteller: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd, No.8 Tongxing Road Economic & Technological Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, China, dulh@lordmed.com

EC REP: Little Doctor Europe Sp. z o.o., ul. Zawila 57G, 30-390 Krakau, Polen, serwis@littledoctor.pl

Importeur: CARBON WEB Kft., 5600 Békéscsaba, Balassa u. 16, Ungarn, carbonmedoffice@gmail.com